

ADULTE CATEGORIE 1

GEMO

AFNOR SPEC S76-001 - « MASQUE BARRIERE » - ADULTE

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est important de respecter la notice d'utilisation.
Si vous êtes malades, ce masque n'est pas adapté, demandez l'avis de votre médecin.
Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant

CATEGORIE 1

Efficacité de filtration des particules 3 microns : supérieure à 90%
La Respirabilité : supérieure à 96 l /m²/s

Comment porter le masque :



Avant de toucher le masque :

- *Lavez-vous les mains (savon ou gel hydro-alcoolique)
- *S'assurer que le masque n'a pas de trous, déchirures ou dégradations.
- *le masque doit être en contact avec la peau uniquement,
- *Ne pas modifier le masque



Mettre le masque :

- * Tenez le masque par les lanières élastiques.
- *Placez-le au niveau de votre bouche.
- * Passez les lanières élastiques derrière la tête
- *Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton, pincez l'arête nasale pour vous aider.



Changer le masque :

- *Quand vous avez porté le masque 4h.
- *Quand vous souhaitez boire ou manger.
- *Quand il devient difficile de respirer et s'humidifie,
- *Si le masque est endommagé.
- * Si le masque est déformé et ne tient plus,



Enlever le masque :

- * Lavez-vous les mains (savon ou gel hydro-alcoolique)
- *Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage,
- *Avant lavage, isoler le masque dans un sachet
- * Si le masque est endommagé jetez-le,
- *Lavez-vous les mains (savon ou gel hydro-alcoolique)

Instructions d'entretien :

Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C.

Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage.

Les masques barrières ne doivent pas sécher à l'air libre.



Rappel des gestes barrières essentiels même avec le port du masque :



Se laver très régulièrement les mains



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Utiliser un mouchoir à usage unique



Saluer sans se serrer les mains et éviter les embrassades

« Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). »